

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO	COMPOSICION
Referencia: 0207 Nombre: Buffer de Giordano Fabricante: TECNOSAR SAS. Familia Química: Soluciones amortiguadas	Fosfato de Potasio Fosfato de Sodio Agua
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	ESTABILIDAD
Solución amortiguadora de pH para la coloración de Wright. Líquido incoloro sin presencia de partículas suspendidas, ni precipitadas.	El producto es estable hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. Conserve de 2-25°C
USOS	TECNICA DE APLICACION
El Buffer de Giordano se encarga de corregir o estabilizar el pH de la solución de Wright en el rango de 6,8 a 7,2 para las coloraciones de frotis sanguíneo y médula ósea.	Después de coloreada la preparación con solución colorante de WRIGHT, adicione uno a dos mililitros de Buffer de Giordano, deje actuar de tres a cinco minutos lave con agua destilada neutra, deje secar y lea al microscopio.
INDICACION PARA ELIMINACION DE RESIDUOS.	MODO DE APLICACION Y PRESENTACION
Las soluciones usadas y las soluciones caducadas deben eliminarse como desechos especiales, y en todo caso cumpliendo con las normas gubernamentales para tal efecto.	El reactivo viene listo para usar, envasado en frascos ámbar PET de 100, 200, 500 y 1000ml u otro volumen a petición del usuario.
SIMBOLOS DE SEGURIDAD	PROTECCION PERSONAL
Este producto no es peligroso de acuerdo a las normas vigentes.	  