

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	COMPOSICIÓN
Referencia: 0301 Nombre: CITOSAR Preparado por: TECNOSAR SAS. Familia: Fijadores de tejidos	Mezcla de alcoholes primarios y secundarios
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	ESTABILIDAD
Estado físico: Liquido Color: incoloro Solubilidad en agua: Soluble Muy volátil	El producto es estable hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta, si se mantiene en un lugar fresco. Conservar de +2 a +30°C.
TECNICA DE APLICACION	FUNDAMENTO DEL METODO
<ol style="list-style-type: none"> Mantenga el envase a una distancia de 15 a 20cm de la muestra. Rocíe la muestra hasta formar una película uniforme. Deje secar por cuatro o cinco minutos para ser analizada. 	<ol style="list-style-type: none"> Fija las muestras citológicas en la lámina portaobjetos, garantizando larga conservación. Una cantidad mínima en la lámina es suficiente para obtener una buena fijación sin alterar el color y la calidad de la muestra. Atomiza sin propelente, por lo tanto no daña la capa de ozono. Contiene alcohol soluble y otros solventes.
ELIMINACION DE RESIDUOS	PRESENTACION
Los residuos del producto deben tratarse como residuos peligrosos.	Frasco PVC de 240ml
SIMBOLOS DE SEGURIDAD	PROTECCION PERSONAL
 INFLAMABLE	